




BOTELLA DE DRENAJE URINARIO

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE ORINA

PARA USO CON CATÉTERES FOLEY PERMANENTES, CATÉTERES EXTERNOS Y APLICACIONES DE UROSTOMÍA PARA MASCULINOS


INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO PARA EL PRODUCTO #4100

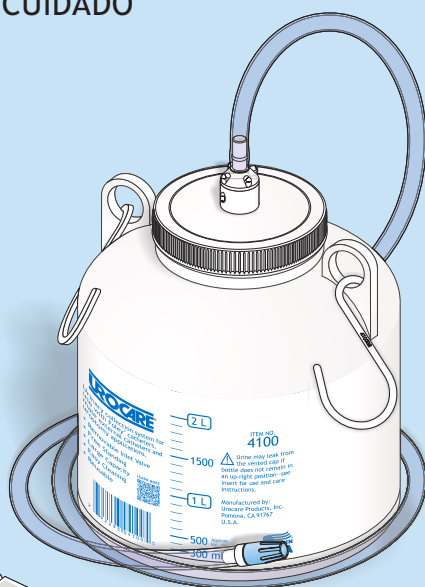

CONTENIDO DEL KIT



- 1 Botella de Drenaje Urinario Duradera (#410001)
- 1 Tapa de Botella con Carcasa (#4101)
- 1 Tubo de drenaje de 60" (1,5 m) con adaptador y tapa (#6061)
- 1 Abrazadera de Tubo Ajustable (#6999)
- 1 Adaptador de Botella de Drenaje Urinario (#6003)
- 1 Válvula Anti-Reflujo Roja "ALTO-FLUJO" (#6001)
- 1 Anillo de Junta Grande (#6000)
- 1 Par de Ganchos para Colgar (#4102)
- Instrucciones Ilustradas de Uso y Cuidado

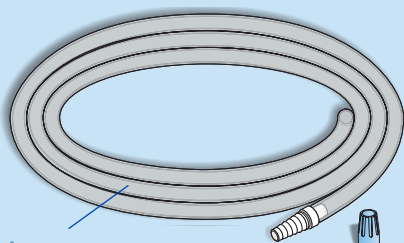

*6061 Tubo de drenaje de vinilo transparente con adaptador graduado y tapa




*6999 Abrazadera de tubo ajustable



*6003 Adaptador para botella de drenaje urinario



*6001 Válvula anti-reflujo de alto flujo

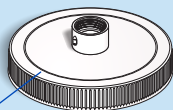

*4101 Tapa de botella para drenaje urinario



FIGURA 1
MONTAJE DE BOTELLA




La orina puede filtrarse por la tapa ventilada si el frasco permanece en posición vertical.

Si falta o se quita la válvula anti-reflujo roja, pueden producirse fugas alrededor de la carcasa de la válvula superior en el centro de la tapa. Será necesario utilizar el anillo de junta incluido (*6000) para sellar las roscas de la carcasa y evitar fugas.

*6000 Junta anular negra
Reemplazar por válvula anti-reflujo cuando no esté en uso.


IMPORTANTE: Para evitar problemas de drenaje, antes de utilizar este producto, lea atentamente todas las instrucciones e información. Comprenda cómo funciona y cómo realizar el mantenimiento adecuado.

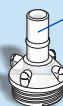

*6003 Adaptador para botella de drenaje urinario




*6001 Válvula anti-reflujo de alto flujo

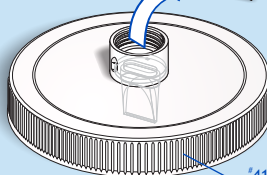

*4101 Tapa de botella para drenaje urinario


FIGURA 2
DETALLE DE LA CARCASA DE LA VÁLVULA SUPERIOR

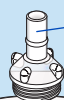

*6003 Adaptador para botella de drenaje urinario

*603005 Carcasa de válvula superior (no se vende por separado)

*4102 Ganchos para botellas de drenaje urinario

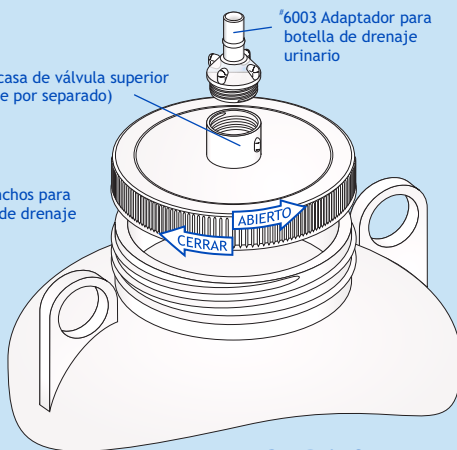

*410001 Botella de drenaje (no se vende por separado)

FIGURA 3
PRIMER PLANO DE LA TAPA DE UNA BOTELLA

Para quitar el adaptador (*6003) de la tapa de la botella, quite el tubo (*6061), sostenga la carcasa (*603005) en su lugar y gire el adaptador en sentido contrario a las agujas del reloj. Para quitar la válvula anti-reflujo (*6001), quite la tapa de la botella y empuje la válvula a través de la carcasa con el dedo desde abajo hacia arriba.

Inspeccione la válvula para detectar cualquier signo visible de daño, distorsión o labios atascados. Apriete suavemente los lados de la válvula hasta que se abra; cuando la suelte, los labios de la válvula deben cerrarse completamente. Para garantizar un funcionamiento correcto, asegúrese de que todas las piezas se vuelvan a ensamblar correctamente antes de volver a usarla (consulte la Figura 2).

¡IMPORTANTE! LEE ESTO PRIMERO:

Para evitar posibles problemas de drenaje, lea todas las instrucciones y precauciones cuidadosamente antes de usar. La botella debe permanecer siempre en posición vertical durante su uso; si se tira o se vuelca, la orina puede filtrarse por el tapón ventilado de la botella.

Dado que la válvula anti-reflujo roja (#6001) cumple dos funciones; primero, como válvula anti-reflujo y segundo, como junta para evitar fugas, es importante que la válvula permanezca en su lugar durante su uso. Si no se desea utilizar la válvula anti-reflujo, será necesario utilizar el anillo de junta (#6000) para sellar las rosas del alojamiento superior de la válvula y evitar fugas.

PARA USO CON CATÉTERES FOLEY®:

PASO 1: Retire la tapa del adaptador en forma de cono del tubo de drenaje de vinilo transparente (#6061)—ver Figura 1. Conecte el extremo de salida del catéter de Foley® al adaptador en forma de cono del tubo de drenaje.

PASO 2: Asegure el extremo opuesto del tubo de drenaje de vinilo transparente al adaptador de botella de drenaje urinario (#6003).

PASO 3: Inserte la válvula anti-reflujo (#6001) en la carcasa de la válvula superior de la tapa de la botella (#4101)—ver Figura 2.

PASO 4: Conecte el adaptador de la botella de drenaje urinario (#6003) a la carcasa de la válvula superior (#603005) de la tapa de la botella (#4101) y luego la tapa a la botella de drenaje (#410001)—vea la Figura 3.

PARA USO CON CATÉTERES EXTERNOS MASCULINOS:

PASO 1: Siga los pasos 1 a 4 anteriores.

PASO 2: Una vez que el catéter, el tubo de drenaje, la tapa de la botella y la botella están todos conectados, el aire que quede en el catéter debe ser exprimido dentro de la botella. Esto garantizará que la válvula de entrada unidireccional (anti-reflujo) funcione correctamente y que se cree un sifón más fácilmente cuando se expulsa la orina. Si lo desea, cebar el sistema con agua corriente antes de usarlo puede ayudar a crear una condición de sifón inmediata.

MANTENER LIMPIA SU BOTELLA DE DRENAJE URINARIO:

El mejor momento para limpiar un dispositivo urinario es inmediatamente después de su uso. El enjuague por sí solo no limpia un dispositivo urinario y el uso de vinagre, blanqueadores o limpiadores de inodoros solo endurece, deforma y daña las piezas de goma, látex y plástico. Una limpieza inadecuada puede causar daños irreversibles y decoloración de la mayoría de los sistemas de recolección de orina... sin mencionar los olores desagradables y vergonzosos.

Recomendamos el uso del limpiador y desodorante para aparatos urinarios y de ostomía Urolux®. Cuando esta solución concentrada se mezcla con agua, limpia y desodoriza los dispositivos urinarios y de ostomía. Las acumulaciones de cristales se disuelven y los olores desagradables se eliminan.

¡No permita que esto le pase a su dispositivo urinario!

- Limpia eficazmente todo el recorrido del fluido.
- La fórmula concentrada dura mucho tiempo
- Disuelve las acumulaciones de cristales úricos y calcio.

Urolux® se vende por botella en los siguientes tamaños:

Artículo #700216 Tamaño estándar 16 oz. fl. (473 mL.) y

Artículo #700204 Tamaño pequeño/de prueba 4 oz. fl. (118 mL.)





PRODUCTOS RELACIONADOS

Urocure® Bolsas para Pierna Reutilizables de Latex

Uro-Safe® Bolsas para Pierna de Vinilo

Urocure® Botellas para Recolección de Urinario

Sistemas y kits de Drenaje Urinario

Sistemas y Kts Urinarios para Hombre

Uro-Con® y Uro-Cath® Catéteres Externos para Hombre

Válvula de Drenaje y Adaptadores

Correas y Soportes de Tela para Bolsas de Pierna

Correas de Catéter

Uro-Bond® Adhesivo de Silicona Para Aplicar con Brocha

Urofoam® Tiras de Espuma Adhesiva

Urocure® Almohadillas Removedoras de Adhesivo

Tracho-Foam® Discos de Espuma Adhesiva

Uro-Prep® Toallitas Protectoras para La Piel

Urolux® Limpiador y Desodorante para Aparatos Urinarios

Conectores y Abrazaderas para Tubos

Tubos de Extensión y Drenaje

DRI Excel™ y DRI Eclipse™ Alarmas para El Tratamiento de La Enuresis

Para más información sobre este u otros productos de Urocure, por favor visite nuestro sitio web en www.urocure.com. Para realizar un pedido, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Fabricado y distribuido por:



Urocure Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
EE. UU.



**POR FAVOR,
RECYCLE**



Hecho en
ÉE. UU.



EE. UU. y Canadá: +1 (800) 423-4441
Fuera de los EE.UU: +1 (909) 621-6013



sales@urocure.com