



Uro-Bond® III Silikonkleber zum Aufbürsten



BESCHREIBUNG

Uro-Bond® III Silikonkleber ist ein druckempfindlicher Silikonklebstoff, der speziell für einzigartige Klebeanwendungen entwickelt wurde. Geliefert als 50% ige Silikon-Feststoff in einer Ethyl-Acetatlösung eignet sich der Kleber zum Verkleben oder Fixieren von nicht permanentem Material auf der Körper-oberfläche. Zu den Merkmalen von Uro-Bond® III gehören die Beibehaltung der Klebeeigenschaften bei Feuchtigkeit oder Schweiß, unbeflüßt von normalen Temperaturschwankungen oder der Verwendungsdauer. Zudem haftet der Kleber auf vielen Oberflächen—Haut, Metalle, Glas, Papier, Gewebe, Kunststoffe, Silikon und Kautschukprodukte.

ANWENDUNGEN

Uro-Bond® III Silikonkleber kann verwendet werden um Verbände, Prothesen und Metall- oder Kunststoffgeräte am Körper zu befestigen. Zu den empfohlenen Anwendungen gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, Sicherung von externen Kondom-urinalen, Fixierung von Kolostomie-, Ileostomie- und Trache-ostomiematerialien, Befestigung von Elektroden auf der Haut zur Patienten-überwachung, Befestigung von chirurgischen Verbänden und Polstern an der Haut und zur Befestigung von Prothesen in der Gesichtschirurgie. Der Käufer sollte Produkte, die teilweise oder auf andere Weise mit Uro-Bond® III Silikonkleber zum Aufbürsten hergestellt wurden, gründlich testen, um die Akzeptanz der Produktleistung in einer bestimmten Anwendung für den eigenen Gebrauch festzustellen.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

WARNUNG: Extrem entzündlich. Flüssigkeiten und Dämpfe können sich entzünden. Nicht während des Rauchens verwenden. Nicht in der Nähe von Feuer, Flammen, Hitze, elektrischen Funken oder anderen Zündquellen verwenden oder lagern. Nur wie angegeben verwenden. Nicht in die Augen bringen. Bei Augenkontakt die Augen sofort mit Wasser spülen, Kontaktlinsen entfernen und Augen mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen. Einen Arzt aufsuchen. Produkt ist schädlich bei Einnahme. Nicht einatmen und in Stoma oder in offene Wunden gelangen lassen. Im Falle einer versehentlichen Einnahme, viel trinken und Giftnotrufzentrale kontaktieren. Wenn Rötungen, Schwellungen oder Ausschläge an und um den Anwendungsbereich auftreten, Anwendung beenden und Arzt kontaktieren. Schädlich für synthetische Gewebe, Holz-oberflächen und einige Kunststoffe. **Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.** Bei Lagerung in seinem ungeöffneten Originalbehälter bei- oder unter Zimmertemperatur 22° C (72° F) hat Uro-Bond® III eine Haltbarkeit von 2 Jahren ab Herstellungsdatum. Wenn sich das Produkt während der Lagerung verdickt, empfiehlt Urocare® die Verwendung von Uro-Bond® III Verdünner (Nr. 501003) um die gewünschte Konsistenz von Uro-Bond® III zu erreichen. **BITTE BEACHTEN: Das Glas nicht über einen längeren Zeitraum offen lassen – sofort nach dem Auftragen sicher verschließen.**

GEBRAUCHSANWEISUNG

Uro-Bond® III wird mit der Bürste die an der Unterseite der Kappe befestigt ist aufgetragen. Um die maximale Haftfähigkeit von Uro-Bond® III zu erreichen, müssen beide Oberflächen gründlich gereinigt und getrocknet werden, bevor Kontakt mit dem Kleber hergestellt wird. Der Klebstoff sollte großzügig aufgetragen werden; zusätzliche Klebstoffschichten können die Haftung erhöhen. Bei Hautirritation den Kleber absetzen und gegebenenfalls den Arzt aufsuchen.

ENTFERNUNG

Gegenstand vorsichtig abziehen. Wenn sich der Kleber oder Kleberrückstände etwas schwer von der Körperoberfläche entfernen läßt, kann die Verwendung von Urocare® Adhesive Remover (Entferner) Pads (Nr. 5600) oder ein anderes medizinisches Klebeband oder Klebstoff Entferner den Entfernungsprozess unterstützen. Bitte nicht Uro-Bond® III Verdünner als Klebstoff Entferner benutzen; Es soll ausschließlich zur Verwendung als Verdünnungsmittel benutzt werden! Um Uro-Bond® III von anderen Oberflächen als der Körperoberfläche zu entfernen, verwenden Sie einen der folgenden Entferner oder Lösungsmittel: Isopropylalkohol (Reibalkohol), Ethylalkohol, Toluol, Xylol, Hexan oder Ethylacetat. Es ist jedoch zu beachten, daß diese Entferner oder Lösungsmittel Hautreizungen verursachen und extrem entzündlich sind. Sie können auch bestimmte Oberflächen beschädigen, z. B. bestimmte Arten von Kunststoffen, und sollten entsprechend verwendet werden. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, die Verwendung eines Entfernens oder Lösungsmittels gründlich zu testen, um die Eignung für die Verwendung festzustellen. Tragen Sie den entsprechenden Entferner großzügig auf ein Tuch oder Mullkissen auf und wischen Sie die Oberfläche sauber.

BESTELLINFORMATIONEN

Wenn Sie Hilfe benötigen oder weitere Informationen zu diesem oder einem anderen Urocare-Produkt wünschen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.urocare.com. Um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Hergestellt und vertrieben von:

 Urocare Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, Kalifornien 91767-1931
USA.

 USA und Kanada: +1 (800) 423-4441
Außerhalb der USA: +1 (909) 621-6013

 sales@urocare.com

Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf Informationen, die wir für richtig und zuverlässig halten. Urocare® fordert Sie jedoch auf, jede Anwendung gründlich zu testen und die Wirksamkeit und Eignung von Uro-Bond® III vor der Verwendung unabhängig zu beurteilen. Verwendungsvorschläge sollten nicht als Anreiz angesehen werden, ein Patent zu verletzen.

