



Urocare Products, Inc. • 2735 Melbourne Avenue • Pomona, California 91767-1931 • U. S. A.
T: (909) 621-6013 • F: (909) 621-4436 • E: sales@urocare.com • I: www.urocare.com



Uro-Bond® III

Adhesivo de silicona para aplicar con pincel



DESCRIPCIÓN

El adhesivo de silicona para aplicar con brocha Uro-Bond® III es un adhesivo de silicona sensible a la presión formulado específicamente para aplicaciones de unión únicas. Se suministra como una solución de sólidos de silicona al 50% en una solución de acetato de etilo y es adecuado para adherir material no permanente a la superficie del cuerpo. Las características de Uro-Bond® III incluyen la retención de las cualidades adhesivas en presencia de humedad o transpiración, las propiedades adhesivas no se ven afectadas por las variaciones normales de temperatura o el tiempo y se adhiere a muchas superficies: piel, metales, vidrio, papel, tela, plásticos, silicona y productos de caucho orgánico.

APLICACIONES

El adhesivo de silicona para aplicación con pincel Uro-Bond® III se puede utilizar para adherir apósitos, prótesis y dispositivos de metal o plástico al cuerpo. Los usos sugeridos incluyen, entre otros: asegurar catéteres urinarios externos masculinos, adherir aplicaciones de colostomía, ileostomía y traqueotomía, colocar electrodos en la piel para monitorizar al paciente, fijar apósitos y almohadillas quirúrgicas en la piel y adherir dispositivos protésicos maxilofaciales. El comprador debe probar exhaustivamente los productos fabricados en parte o de otro modo que incorporen el adhesivo de silicona para aplicación con pincel Uro-Bond® III para determinar la aceptabilidad del rendimiento del producto en una aplicación específica para su propio uso.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

ADVERTENCIA: Extremadamente inflamable. El líquido y los vapores pueden encenderse. No lo use mientras fuma. No lo use ni lo guarde cerca del fuego, llamas, calor, chispas eléctricas o cualquier otra fuente de ignición. Úselo únicamente según las instrucciones. Manténgase alejado de los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua, quítese los lentes de contacto y continúe enjuagando los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Comuníquese con un médico. Es nocivo si se ingiere. No inhale ni permita que el adhesivo entre en el estoma o en heridas abiertas. En caso de ingestión accidental, administre líquidos en abundancia y consulte con el CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO local. Si aparece enrojecimiento, hinchazón o sarpullido cerca del área de uso, suspenda el uso. Comuníquese con un médico. Es nocivo para las telas sintéticas, los acabados de madera y algunos plásticos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Cuando se almacena en su envase original sin abrir a una temperatura de 22° C (72° F) o inferior, Uro-Bond® III tiene una vida útil de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación. Si el producto se espesa durante el almacenamiento, Urocare recomienda el uso de Uro-Bond® Thinner (n.º 501003) para que Uro-Bond® III recupere la consistencia deseada. **TENGA EN CUENTA: No deje el frasco abierto durante períodos prolongados.**—Cierre bien la tapa inmediatamente después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

Dado que Uro-Bond® III se suministra como una solución de sólidos de silicona al 50% en una solución de acetato de etilo, normalmente se utiliza tal como se suministra. Se aplica con el pincel colocado en la parte inferior de la tapa. Para obtener la máxima capacidad de adhesión de Uro-Bond® III, las superficies deben limpiarse a fondo antes de la aplicación y dejarse secar completamente antes de que entren en contacto. El adhesivo debe aplicarse generosamente en ambas superficies que se van a adherir; capas adicionales de adhesivo pueden aumentar la adhesión.

RETIRO

Para quitar Uro-Bond® III de la superficie corporal, utilice las almohadillas para quitar adhesivos Urocare® (n.º 5600) u otro removedor de cinta adhesiva y adhesivo médico. No utilice el diluyente Uro-Bond® como removedor de adhesivos; iestá diseñado estrictamente para usarse solo como agente diluyente! Para quitar Uro-Bond® III de superficies que no sean la superficie corporal (piel), utilice uno de los siguientes removedores o solventes: alcohol isopropílico (alcohol para frotar), alcohol etílico, tolueno, xileno, hexano o acetato de etilo; sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos removedores o solventes pueden causar irritación de la piel y son altamente inflamables. También pueden deteriorar ciertas superficies, por ejemplo: ciertos tipos de plásticos, y deben usarse en consecuencia. Es responsabilidad del comprador probar minuciosamente el uso de cualquier removedor o solvente para determinar su idoneidad. Aplique generosamente el removedor adecuado en un paño o gasa y limpie la superficie.

EMBALAJE

El adhesivo de silicona con pincel Uro-Bond® III se suministra en frascos de vidrio de 88,7 ml/3 fl. oz. (N.º 500003) y 44,4 ml/1½ fl. oz. (N.º 5000015) con un cepillo adherido a la tapa.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Si necesita ayuda o desea obtener más información sobre este o cualquier otro producto de Urocare, visite nuestro sitio web en www.urocare.com. Para realizar un pedido, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Fabricado y distribuido por:



Urocare Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, California 91767-1931
USA.



Estados Unidos y Canadá: +1 (800) 423-4441
Fuera de los Estados Unidos: +1 (909) 621-6013



sales@urocare.com

La información aquí contenida se basa en información que consideramos precisa y confiable; sin embargo, Urocare lo alienta a que pruebe exhaustivamente cualquier aplicación y concluya de manera independiente sobre la eficacia y la idoneidad de Uro-Bond® III antes de su uso. Las sugerencias de uso no deben tomarse como incentivos para infringir ninguna patente.



**POR FAVOR,
RECICLE**

FORM NO: PI5000ES-10115004F