



Uro-Bond® III

Adhésif en silicone à appliquer au pinceau



DESCRIPTION

L'adhésif silicone à appliquer au pinceau Uro-Bond® III est un adhésif silicone sensible à la pression spécialement formulé pour des applications de collage uniques. Fourni sous forme de solution de solides de silicone à 50% dans une solution d'acétate d'éthyle, il convient pour faire adhérer des matériaux non permanents à la surface du corps. Les caractéristiques d'Uro-Bond® III comprennent la conservation des qualités adhésives en présence d'humidité ou de transpiration, les propriétés adhésives ne sont pas affectées par les variations normales de température ou le temps et il adhère à de nombreuses surfaces : peau, métaux, verre, papier, tissu, plastiques, silicone et produits en caoutchouc organique.

APPLICATIONS

L'adhésif silicone à appliquer au pinceau Uro-Bond® III peut être utilisé pour coller des pansements, des prothèses et des dispositifs en métal ou en plastique sur le corps. Les utilisations suggérées comprennent, sans toutefois s'y limiter : la fixation de cathéters urinaires externes masculins, le collage d'applications de colostomie, d'iléostomie et de trachéotomie, la fixation d'électrodes sur la peau pour la surveillance du patient, la fixation de pansements et de tampons chirurgicaux sur la peau et le collage de dispositifs prothétiques maxillo-faciaux. L'acheteur doit tester minutieusement les produits fabriqués en partie ou autrement incorporant l'adhésif silicone à appliquer au pinceau Uro-Bond® III afin de déterminer l'acceptabilité des performances du produit dans une application spécifique pour son propre usage.

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

ATTENTION : Extrêmement inflammable. Le liquide et les vapeurs peuvent s'enflammer. Ne pas utiliser en fumant. Ne pas utiliser ni entreposer près d'un feu, d'une flamme, d'une source de chaleur, d'étincelles électriques ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser seulement selon les instructions. Garder hors de vue. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement les yeux à l'eau, retirez les verres de contact et continuez à rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Communiquer avec un médecin. Nocif en cas d'ingestion. Ne pas inhaler ni laisser l'adhésif pénétrer dans une stomie ou des plaies ouvertes. En cas d'ingestion accidentelle, administrer généreusement des liquides et consulter le CENTRE ANTIPOISON local. Si des rougeurs, un gonflement ou une éruption cutanée apparaissent près de la zone d'utilisation, cessez l'utilisation. Contactez un médecin. Nocif pour les tissus synthétiques, les finis en bois et certains plastiques. Garder hors de la portée des enfants. Lorsqu'il est conservé dans son contenant d'origine non ouvert à une température inférieure ou égale à 22 °C (72 °F), Uro-Bond® III a une durée de conservation de deux (2) ans à compter de la date de fabrication. Si le produit épaisse pendant l'entreposage, Urocare recommande l'utilisation du diluant Uro-Bond® (n° 501003) pour ramener Uro-Bond® III à la consistance souhaitée.

ATTENTION : Ne pas laisser le pot ouvert pendant de longues périodes—Bien refermer le bouchon immédiatement après l'application.

MODE D'EMPLOI

Étant donné qu'Uro-Bond® III est fourni sous forme de solution à 50% de solides de silicone dans une solution d'acétate d'éthyle, il est normalement utilisé tel que fourni. Il s'applique à l'aide du pinceau fixé sous le capuchon. Pour obtenir la capacité d'adhérence maximale d'Uro-Bond® III, les surfaces doivent être soigneusement nettoyées avant l'application et laissées sécher complètement avant tout contact. L'adhésif doit être appliqué généreusement sur les deux surfaces à coller ; des couches supplémentaires d'adhésif peuvent augmenter l'adhérence.

RETRAIT

Pour retirer Uro-Bond® III de la surface du corps, utilisez les tampons de retrait d'adhésif Urocare® (n° 5600) ou un autre dissolvant de ruban adhésif et de ruban médical. N'utilisez pas le diluant Uro-Bond® comme dissolvant adhésif ; il est strictement destiné à être utilisé uniquement comme agent diluant ! Pour retirer Uro-Bond® III des surfaces autres que la surface du corps (peau), utilisez l'un des dissolvants ou solvants suivants : alcool isopropylique (alcool à friction), alcool éthylique, toluène, xylène, hexane ou acétate d'éthyle ; il convient toutefois de noter que ces dissolvants ou solvants peuvent provoquer une irritation cutanée et sont hautement inflammables. Ils peuvent également détériorer certaines surfaces, par exemple : certains types de plastiques, et doivent être utilisés en conséquence. Il incombe à l'acheteur de tester soigneusement l'utilisation de tout dissolvant ou solvant afin de déterminer la pertinence de son utilisation. Appliquez généreusement le dissolvant approprié sur un linge ou une compresse de gaze et essuyez la surface.

ÉTAT

L'adhésif silicone à appliquer au pinceau Uro-Bond® III est fourni dans un flacon de 88,7 ml. (3 fl. oz.) (n° 500003) et 44,4 ml. (1½ fl. oz.) (n° 5000015) bocal en verre avec une brosse fixée au bouchon.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Si vous avez besoin d'aide ou pour plus d'informations sur ce produit ou tout autre produit Urocare, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.urocare.com. Pour passer une commande, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.

Fabriqué et distribué par :

 Urocare Products, Inc.
2735, Melbourne Avenue
Pomona, Californie 91767-1931
USA.

 États-Unis et Canada: +1 (800) 423-4441
À l'extérieur des États-Unis: +1 (909) 621-6013

 sales@urocare.com

Les renseignements contenus dans le présent document sont fondés sur des renseignements que nous considérons comme exacts et fiables ; Cependant, Urocare vous encourage à tester minutieusement toute application et à conclure de manière indépendante l'efficacité et la pertinence d'Uro-Bond® III avant utilisation. Les suggestions d'utilisation ne devraient pas être considérées comme des incitations à violer un quelconque brevet.

